

SPITALUL ORĂSENESC BUHUȘI

Oras Buhuși, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău. A.S.F. nr. 925 din 19. 04. 2017. C.I.F. 4187271. Cod postal 605100.

Accreditat A.N.M.C.S. ORDIN 235/ 30.12.2015. Operator de date Nr.notificare. 17475

Tel: 0234-262220 – centrala. Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;

e-mail: spitalbuhusi@gmail.com. site: www.spitalbuhusi.ro



I.S.O. 9001/ studii clinice
N.C.56336/A/001/UK/Ro

O.H.S.A.S. 18001
N.C.56336/B/0001/UK/Ro

Nr. 22/17 din 07.082017.

Avertisment: Acest document conține informații și date care sunt proprietatea Spitalului Orășenesc Buhuși.
Reproducerea și difuzarea sunt în exclusivitate dreptul spitalului.

PROCEDURĂ DE UTILIZARE A FILTRULUI DEMICAP 0.2MICRONI

PROCEDURA	Operationala	X	De sistem
COD STRUCTURĂ B.O			
NUMĂR PROCEDURĂ 2015			
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT	Medico-chirurgicale		Nemedical
COD PROCEDURĂ PO.BO.03.N			X
EXEMPLARUL nr.			

Elaborat. As.POIANA Liliana	Data. 04-08-2017.	Semnatura.
Verificat. Dir. Medical. ROTARU Hilda.	Data. 04-08-2017.	Semnatura.
Verificat pentru conformitate reprezentant birou calitate.	Data. 07-08-2017.	Semnatura.
Aprobat. Manager. Dr. TORON Mouhannad.	Data. 07-08-2017.	Semnatura.
Diseminare. Catre Bloc Operator Chirurgie		
Aplicare. De catre personalul de la Bloc Operator		

Editia/Revizia	Componenta revizuită	Descrierea modificarii	Data de la care se aplică prevederile edifiției / reviziei
Editia I			30.03.2015
Revizia 1	X	Incadrarea in forma , format conform noului model de elaborare a procedurilor SOB	09.08.2017.
Revizia 2			
Revizia 3			
Revizia acestei proceduri se face tinand cont de rezultatele implementarii, indicatorilor de monitorizare de structura, de proces, rezultatelor obtinute, modificari legislative, modificari de circuite, reorganizari interne, etc.			
Revizia nu este obligatorie decat daca se indeplinesc cel puțin unul dintre criteriile sus mentionate.			

Scop:

Producerea corectă și fără riscuri pentru pacienți a apei sterile prin folosirea filtrului Demicap 0,2 microni

Spitalul Orășenesc Buhuși.

Biroul de calitate. 1



Documente de referinta.

Instructiuni de utilizare filtru Demicap 0,2microni

Descrierea procedurii:

Pregatirea filtrului pentru sterilizare

1. Se tineți filtrul cu o mana iar cu cealalta se ridica inelul de racord rapid al gatului de lebada, se scoate filtrul.
2. Se scurge apa din filtru prin rotire, dupa ce in prealabil au fost deschise cele 2 guri de aerisire.
3. Se usuca la exterior si se noteaza cu un marker permanent pe eticheta de sterilizare a filtrului si in registru.
4. Se ambaleaza cu cele doua guri de aerisire deschise.
5. Filtrul se autoclaveaza la 134 grade C timp de 18 minute (maxim 60 de cicluri).

Reconectare filtrului DEMICAP 0,2microni sterilizat in autoclava

1. Se lasa apa sa curga pentru un minut inainte de a conecta filtrul, pentru a curata gatul de lebada.
2. Se deschide punga care contine filtrul si se extrage fara a-l atinge .
3. Se tine filtrul, inca in pachetul sau cu o singura mana , cu cealalta mana se ridica inelul de racord rapid. Se introduce adaptorul in racordul rapid si se elibereaza inelul racordului.
4. Se trage usor de filtru pentru a verifica daca adaptarea acestuia este buna , daca nu , se repeta operatiunea.
5. Punga de autoclavare se pastreaza pe filtru pana la utilizare.
6. Inainte de utilizare, se strange orificiul de aerisire ,se lasa apa sa curga pentru a elimina apa din filtru.

Atentie !

Un filtru al carui capat inferior este in contact cu un obiect (mana ori altceva) nu mai este steril. Ar trebui inlocuit. Filtrul DEMICAP 0,2 microni trebuie autoclavat la fiecare 24 ore la 134 grade C timp de 18 min Daca a fost folosit.

Responsabilitati.

Personalul din blocul operator

Anexe Inscrisuri.

Registru evidenta numar sterilizari

Motivarea elaborarii.

Respectarea tuturor masurilor privind prevenirea si combaterea infectiilor asociate asistentei medicale.



Distribuire documentație pentru Procedura de utilizare a filtrului DEMICAP 0.2microni

Data difuzării	Nr. ex, difuzat. Ex o se gasește la S.M.C.	Sectia/ compartimentul unde a fost difuzat	Cine a primit exemplarul.
07-08-2017	1	Bloc Operator	As.Oprea Cristina

Tabel luare la cunostință/ instruire de către/ a personalului pentru Procedura de utilizare a filtrului DEMICAP 0.2microni

Data. 08.07-2017


	Nume / prenume	Funcția.	Semnatura.
1	Oprea Cristina	As.medical	<i>[Signature]</i>
2	Simion Florentina	Infirmiera	<i>[Signature]</i>

Tabel testare personal

Data testarii. 09.08.2017

Cine a efectuat testarea As.Poiana Liliana

	Nume / prenume	B.	S.	Ns.	Semnatura
1	Oprea Cristina	X			<i>[Signature]</i>
2	Simion Florentina	X			<i>[Signature]</i>

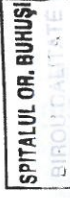

Centralizator pentru indicatorii de monitorizare ai rezultatelor/analiza rezultatelor implementarii pentru Procedura de utilizare a filtrului DEMICAP 0,2microni

Indicatori de monitorizare		Analiza 1 data	Analiza 2 data	Analiza 3 data	Analiza 4 data
Indicatori de structura. Personal (medici, asistente medicale, infirmiere, alte categorii de personal)					
Indicatori de proces. Echipamente Materiale sanitare Materiale de curatenie Biocide					
Indicatori de rezultat . Eficienta ingrijirilor Eficienta manevrelor medicale Cresterea calitatii serviciilor medicale Cresterea calitatii serviciilor hoteliere					



Spitalul Orasenesc Buhusi.

Biroul de calitate.

