

SPITALUL ORĂȘANESC BUHUȘI

Oras Buhuși, str. Văloagă nr.3, jud. Bacău, A.S.F. nr. 883 din 19. 04. 2017. C.I.F. 4187271. Cod postal 605100.

Accreditat A.N.M.C.S. ORDIN 235/ 30.12.2015. Operator de date Nr.notificare. 17475

Tel: 0234-262220 - centrala. Tel/Fax: 0234-261560 - secretariat;

e-mail: spitalbuhusi@gmail.com. site: www.spitalbuhusi.ro



I.S.O. 9001/ studii clinice
N.C. 56336/A/001/UK/Ro

I.S.O. 22000
N.C. 56336/A/0002/UK/Ro

O.H.S.A.S. 18001
N.C.56336/B/0001/UK/Ro

Nr. 5706 din 12.06.2017.

Avertisment! Acest document conține informații și date care sunt proprietatea Spitalului Orășenesc Buhuși. Reproducerea și difuzarea sunt în exclusivitate dreptul spitalului.

PROCEDURA DE UTILIZARE A LAMPIL BACTERICIDE CU RAZA U.V

PROCEDURĂ DENUMIRE	Operationala	X	De sistem
COD STRUCTURĂ BO			
NUMĂR PROCEDURĂ 04.2016			
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT	Medico-chirurgicale		Nemedical
COD PROCEDURĂ PO.BO.04.N			X
EXEMPLARUL nr.			

Elaborat. As. med.POIANA Liliana	Data. 09.VI.2017	Semnatura.
Verificat. Dir. Medical. ROTARU Hilda.	Data. 09.VI.2017	Semnatura.
Verificat pentru conformitate reprezentant birou calitate.	Data. 09.VI.2017	Semnatura.
Aprobat. Manager. Dr. TORON Mouhannad.	Data. 09.VI.2017	Semnatura.
Diseminare. Catre Bloc Operator Chirurgie		
Aplicare. De catre personalul de la Bloc Operator		

Editia/Revizia	Componenta revizuită	Descrierea modificarii	Data de la care se aplică prevederile ediției / reviziei
Ediția 1			24.03.2014
Revizia 1			19.12.2016
Revizia 2		Caracteristici tehnice (achiziție lampa ultraviolete noua)	15.VI.2017
Revizia 3			

Revizia acestei proceduri se face tinand cont de rezultatele implementarii, indicatorilor de monitorizare de structura, de proces, rezultatelor obtinute, modificari legislative, modificari de circuite, reorganizari interne, etc.

Revizia nu este obligatorie decat daca se indeplinesc cel puțin unul dintre criteriile sus menționate.

Scop.

Realizarea unui mediu steril unde sa se desfasoare in siguranta actul operator.

Spitalul Orasesenesc Buhuși

Biroul de calitate.

SPITALUL BIROU DE CALITATE

1

Definitii .

Lampa bactericida UV este utilizata ca metoda fizica de dezinfectie a aerului si a suprafetelor distrugand pana la 99% din microorganismele (virusuri, mucegaiuri, drojdii, bacterii) din spatii unde incarcatura microbiana este ridicata. Metoda completeaza curatenia si dezinfectia.

Documente de referinta.

Ord.M.S.1096 din 2016

Descrierea procedurii.

Asistenta de serviciu conecteaza lampa la o sursa de energie.

Incaperea unde se aplica lampa UV trebuie curatata si dezinfectata in prealabil de infirmiera. Lampa se lasa sa actioneze 30 minute (se poate ajunge pana la 48 cicluri/24h), se consemneaza in registrul de functionare a lampii UV data, ora inceperii, ora finalizarii, persoana responsabila si semnatura.

PARTICULARITATI:

-tubul bactericid al lampii trebuie pastrat in perfecta stare de curatenie (dupa deconectare de la retea) se sterge cu o laveta imbibata in solutie dezinfectanta pe baza de alcool

-in cazul in care pe tub exista materie organica aceasta interfera cu lungimea de unda a lampii modificandu-se efectul germicid al acesteia (lungimea de unda cu efect germicid maxim este de 253.7nm)

-in momentul aplicarii lampii ,ferestrele trebuie inchise si nu trebuie sa existe persoane in incapere)

-dezinfectia se mentine atat cat nu exista surse de recontaminare (pacienti cu boli respiratorii, personal, ferestre deschise)

-cand s-a ajuns la numarul de ore de functionare de 8000 h/tub, trebuie anuntat responsabilul cu aparatura medicala si schimbat tubul consemnandu-se schimbarea (data)

Responsabilitati.


Personalul din blocul operator

Anexe Inscrise.

Nu este cazul

Motivarea elaburarii.

Respectarea tuturor masurilor privind prevenirea si combaterea infectiilor asociate asistentei medicale.

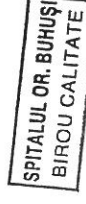

Distribuire documentație pentru procedura de utilizare a lampii bactericide UV

Data difuzării	Nr. ex, difuzat. Ex o se gasește la S.M.C.	Sectia/ compartimentul unde a fost difuzat	Cine a primit exemplarul.
	1	Bloc Operator	As.Oprea Cristina

Tabel luare la cunostință/instruire de către/ a personalului pentru Procedura de utilizare a lampii bactericide cu raza UV

Data. 12.VI.2017

	Nume / prenume	Funcția.	Semnatura.
1	OPREA Cristina	As.med.pr.	<i>[Signature]</i>
2	SIMION Florentina	Infirmiera	<i>[Signature]</i>

Data la care urmeaza sa fie efectuata testarea.personalului 14.VI.2017

Tabel testare personal

Data testarii. 14.VI.2017

Cine a efectuat testarea As.Poiana Liliana

	Nume / prenume	B.	S.	Ns.	Semnatura
1	OPREA Cristina	x			<i>[Signature]</i>
2	SIMION Florentina	x			<i>[Signature]</i>



Spitalul Orasenesc Buhusi.

Biroul de calitate.



Centralizator pentru indicatorii de monitorizare ai rezultatelor/analiza rezultatelor implementarii pentru procedura de utilizare a lampii bactericide cu raze UV

Indicatori de monitorizare ai rezultatelor		Analiza 1 data	Analiza 2 data	Analiza 3 data	Analiza 4 data
Indicatori de structură. Personal (medici, asistente medicale, infirmiere, alte categorii de personal)					
Indicatori de proces. Echipamente Materiale sanitare Materiale de curatenie Biocide					
Indicatori de rezultat . Eficienta ingrijirilor Eficienta manevrelor medicale Cresterea calitatii serviciilor medicale Cresterea calitatii serviciilor hoteliere					

Biroul de calitate.

SPITALUL OR. BUHUȘI
BIROU CALITATE



Spitalul Orășnesc Buhuși.