

SPITALUL ORASENESCU BUHUSI

Oras Buhuși, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău. A.S.F. nr. 925 din 19. 04. 2017. C.I.F. 4187271. Cod postal 605100.
Accreditat A.N.M.C.S. ORDIN 235/ 30.12.2015. Operator de date Nr.notificare. 17475
Tel: 0234-262220 – centrala. Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;
e-mail: spitalbuhusi@gmail.com. site: www.spitalbuhusi.ro



Nr. 4419 din 07.08.2017.
Reproducerea și difuzarea sunt în exclusivitate dreptul spitalului.

PROCEDURĂ DE UTILIZARE DEFIBRILATOR PRIMEDIC MONITOR XD30

PROCEDURA	Operationala	X	De sistem
COD STRUCTURĂ BO			
NUMĂR PROCEDURĂ			
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT	Medico-chirurgicale	X	Nemedical
COD PROCEDURĂ PO.BO.05.MC			
EXEMPLARUL nr.			

Elaborat. As.Bloc Operator POIANA Liliana C.C.T CIUPERCA Teodora	Data. 07-08-2017	Semnatura. <i>[Signature]</i>
Verificat. Dir. Medical. ROTARU Hilda.	Data. 07-08-2017	Semnatura. <i>[Signature]</i>
Verificat pentru conformitate reprezentant birou calitate.	Data. 07-08-2017	Semnatura. CONS MANAGER DE CALITATE
Aprobat. Manager. Dr. TORON Mouhannad.	Data. 07-08-2017	Semnatura.
Diseminare. Catre Bloc Operator		
Aplicare. De catre personalul de la Bloc Operator		




Ediția/Revizia	Componenta revizuită	Descrierea modificării	Data de la care se aplică prevederile ediției / reviziei
Ediția I	x		09.08.2017
Revizia 1			
Revizia 2			
Revizia 3			

Revizia acestei proceduri se face tinand cont de rezultatele implementarii, indicatorilor de monitorizare de structura, de proces, rezultatelor obținute, modificari legislative, modificari de circuite, reorganizari interne, etc.
Revizia nu este obligatorie decat daca se indeplinesc cel puțin unul dintre criteriile sus mentionate.

Scop.

Utilizarea corecta si fara riscuri pentru personal si pacienti a defibrilatorului primedic monitor xd30.

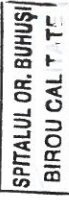

Spitalul Orasenesc Buhuși.

Biroul de calitate.

Definitii .

Defibrilarea este metoda de tratament utilizata in mod curent in cazul aritmiilor cardiace, pentru fibrilatia ventriculara sau tahicardia ventriculara fara puls. Defibrilatia consta in administrarea unei doze terapeutice de energie electrica in zona afectata a inimii cu un instrument numit defibrilator.

Documente de referinta.

Nu este cazul

Descrierea procedurii.

Sansele de supravetuire ale victimei vor creste daca persoana care ofera primul ajutor incepe resuscitarea si defibrilarea in primele minute de la instalarea stopului cardiac.

Utilizarea aparatului se face numai pe un pacient daca:

- victima nu are reactii si nu respira
- starea pacientului solicita, respectiv permite o utilizare a acestuia.
- porniti imediat defibrilatorul. Urmati instructiunile pe care le afiseaza defibrilatorul.
- dezveliti pieptul victimei si atasati electrozii
- medicul este cel care decide ce incarcatura(masurata in Joule)se utilizeze, bazandu-se pe ghiduri.
- asigurati-va ca nimeni nu atinge victima in timp ce defibrilatorul analizeaza ritmul cardiac.
- daca este necesar un soc electric, asigurati-va ca nu se afla nimeni in apropierea victimei si ca nimeni nu atinge victima .Apasati butonul pentru declansarea socului, atunci cand aparatul va solicita acest lucru. Un dispozitiv complet automat va administra singur socul electric.
- daca dispozitivul va solicita sa incepeti procedura de RCP, incepeti imediat resuscitarea.
- alternati 30 de compresii toracice cu 2 respiratii gura la gura.
- opriti resuscitarea daca victima incepe sa respire normal. Nu opriti dispozitivul si mentineti electrozii pe pieptul victimei. Daca victima nu-si recapata cunostinta, asezati-o in pozitia de siguranat.
- Curatare, intretinerea, se realizeaza in stare deconectata si cu electrozii scosi. Nu se vor utiliza lavete umede pentru curatare.
- Padelele se vor curata dupa fiecare utilizare.
- In cazul deteriorarii componentelor acestea necesita reparare imediat sau schimbate.

Responsabilitati.


Personalul din Bloc Operator

Anexe Inscrisuri.

Nu este cazul

Motivarea elaborarii.

Reglementarea folosirii corecte de catre personalul de la blocul operator a defibrilator primedic monitor xd30

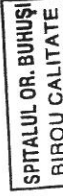

Distribuire documentație pentru procedura de utilizare a defibrilatorului primedic monitor xd30

Data difuzării	Nr. ex, difuzat. Ex o se gasește la S.M.C.	Sectia/ compartimentul unde a fost difuzat	Cine a primit exemplarul
07-08-2017	1	Bloc Operator	Oprea Cristina

Tabel luare la cunostință/ instruire de către/ a personalului pentru procedura de utilizare a defibrilatorului primedic monitor xd30

Data 08.08.2017

	Nume / prenume	Funcția.	Semnatura.
1	Oprea Cristina	As.med.pr.	<i>[Signature]</i>
2	Simion Florentina	Infirmiera	<i>[Signature]</i>

Data la care urmeaza sa fie efectuata testarea.personalului 08.08.2017

Tabel testare personal

Data testarii. 09.08.2017

Cine a efectuat testarea As.Poiana Liliana

	Nume / prenume	B.	S.	Ns.	Semnatura
1	Oprea Cristina	X			<i>[Signature]</i>
2	Simion Florentina	X			<i>[Signature]</i>



SPITALUL OR. BUHUȘI
BIROU CALITATE

Spitalul Orasenesc Buhusi.

Biroul de calitate. 3

Centralizator pentru indicatorii de monitorizare ai rezultatelor/analiza rezultatelor implementarii pentru procedura de utilizare a defibrilatorului primedic monitor xd30

Indicatori de monitorizare		Analiza 1 data	Analiza 2 data	Analiza 3 data	Analiza 4 data
Indicatori de structura. Personal (medici, asistente medicale, infirmiere, alte categorii de personal)					
Indicatori de proces. Echipamente Materiale sanitare Materiale de curatenie Biocide					
Indicatori de rezultat . Eficienta ingrijirilor Eficienta manevrelor medicale Cresterea calitatii serviciilor medicale Cresterea calitatii serviciilor hoteliere					



Biroul de calitate.

