

# SPITALUL ORĂȘENESC BUHUȘI

Oras Buhuși, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău. A.S.F. nr. 925 din 19. 04. 2017. C.I.F. 4187271. Cod postal 605100.

Accreditat A.N.M.C.S.. ORDIN 235/ 30.12.2015. Operator de date Nr.notificare. 17475

Tel: 0234-262220 – centrala. Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;

e-mail: [spitalbuhusi@gmail.com](mailto:spitalbuhusi@gmail.com). site: [www.spitalbuhusi.ro](http://www.spitalbuhusi.ro)



I.S.O. 9001/ studii clinice  
N.C.56336/A/001/UK/Ro



I.S.O. 22000  
N.C. 56336/A/0002/UK/Ro



O.H.S.A.S. 18001  
N.C.56336/B/0001/UK/Ro

Spitalul  
Orășenesc  
Buhuși



Nr. 11309 din 15.11.2017.

**Avertisment!** Acest document conține informații și date care sunt proprietatea Spitalului Orasenesc Buhuși.  
Reproducerea și difuzarea sunt în exclusivitate dreptul spitalului.

## PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND UTILIZAREA ETUVEI CU AER CALD (PUPINEL)

<b>PROCEDURA</b>	<b>Operationala</b>	<b>x</b>	<b>De sistem</b>	
<b>COD STRUCTURĂ ST.</b>				
<b>NUMĂR PROCEDURA 05</b>				
<b>DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT</b>	<b>Medico-chirurgicale</b>		<b>Nemedical</b>	<b>x</b>
<b>COD PROCEDURA PO.ST.05.N.</b>				
<b>EXEMPLARUL nr.</b>				

<b>Elaborat.</b> As.med.pr. PASCU Adina Gabriela	<b>Data.</b> 14.11.2017	<b>Semnatura.</b>
<b>Verificat.</b> Dir. Medical. ROTARU Hilda.	<b>Data.</b> 15.11.2017	<b>Semnatura.</b>
<b>Verificat pentru conformitate reprezentant birou calitate.</b>	<b>Data.</b> 15.11.2017	<b>Semnatura.</b> CONSTANTINESCU C. I. MANAGER DE CALITATE
<b>Aprobat.</b> Manager. Dr. TORON Mouhannad.	<b>Data.</b> 15.11.2017	<b>Semnatura.</b>
<b>Diseminare.</b> Catre personalul medical din Statia centrala de sterilizare, Spitalul Orasenesc Buhuși		
<b>Aplicare.</b> De catre personalul medical din Statia centrala de sterilizare, Spitalul Orasenesc Buhuși		

Editia/ Revizia	Componenta revizuită	Descrierea modificării	Data de la care se aplică prevederile ediției / reviziei
Ediția I	x		17.11.2017
Revizia 1			
Revizia 2			
Revizia 3			


**Revizia acestei proceduri se face tinand cont de rezultatele implementarii, indicatorilor de monitorizare de structura, de proces, rezultatelor obtinute, modificari legislative, modificari de circuite, reorganizari interne, etc.**

**Revizia nu este obligatorie decat daca se indeplinesc cel putin unul dintre criteriile sus mentionate.**

### Scop.

Sterilizarea la pupinel a instrumentarului folosit în efectuarea actului medical

Spitalul Orasenesc Buhuși.

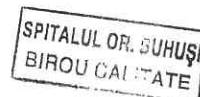

Biroul de calitate.

## **Definitii .**

Sterilizarea la etuva se folosește pentru obiecte metalice sau de sticla

## **Documente de referinta.**

Instrucțiuni de lucru furnizate de producătorul aparatului.

Norme tehnice privind sterilizarea în unitățile sanitare conform Ord.MS 961/2016

## **Descrierea procedurii.**

Mod de lucru

Sterilizarea la etuva(Pupinel)se efectueaza la temperatura de 180 grade celsius ,timp de 1 h de la atingerea acestei temperaturi,sau 160 grade celsius timp de 2 h.

Ciclul complet al unei sterilizari are 3 timpi:

-incalzirea la temperatura indicată pentru sterilizare

-mentinerea temperaturii realizate în tot timpul indicat pentru sterilizare

-racirea aparatului

Personalul care efectueaza sterilizarea la cuptorul cu aer cald,trebuie sa asigure așezarea materialelor astfel încât aerul sa circule ușor între obiecte respectand planurile delimitate prin rafturi.Este interzisă scoaterea rafturilor.

La fiecare sarja de sterilizare, se vor introduce teste de verificare a eficientei sterilizarii ,respectiv banda test control pentru controlul sterilizarii la aer cald,in interiorul fiecărei truse . În timpul ciclului de sterilizare este interzis să se deschidă aparatul la temperatura peste 80 grade celsius.

Durata de valabilitate a sterilelor este de 24 h ,cu conditia mentinerii cutiilor inchise. Se banderoleaza trusele,baderola va cuprinde urmatoarele:data,ziua și ora sterilizarii,continutul ambalajului,aparatul la care s-a sterilizat și numărul ciclului din tura respectiva,indicativul persoanei care a sterilizat.Aceste date se înscriu în registru tipizat pentru evidentierea activitatii Statiei de sterilizare.

Orice material nu se scoate din Pupinel înainte de scaderea temperaturii.

Nu se deschide ușa pupinelului dacă acesta funcționează.

Se monitorizeaza atent activitatea aparatului aflat în funcțiune.

Aparatul trebuie sa aibă neapărat covor electroizolant.

Materialele se vor scoate din interiorul etuvei numai după ce temperatura a coborat sub 80 de grade celsius.

Aparatele de măsura și control vor fi verificate la termenele scadente

## **Responsabilitati.**


Asistentii medicali din cadrul Statiei de sterilizare

## **Anexe Inscrisuri.**

Nu este cazul

## **Motivarea elaborarii.**

Utilizarea corespunzatoare a etuvei cu aer cald(Pupinel)

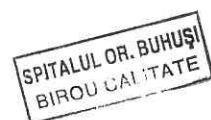



Distribuire documentație a procedurii operationale privind utilizarea etuvei cu aer cald(Pupinel)

Data difuzării	Nr. ex, difuzat. Ex o se găsește la S.M.C.	Sectia/ compartimentul unde a fost difuzat	Cine a primit exemplarul.
15.11.2017	1	Sterilizare	As.Pascu G.

Tabel luare la cunostință/ instruire de către/ a personalului pentru procedura operationala privind utilizarea etuvei cu aer cald(Pupinel)

Data...15.11.2017.....

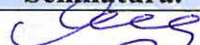

	Nume / prenume	Funcția.	Semnatura.
1	Mares Mariana	As.med. Coord.	
2	Poiana Tardea Elena	As.med.	

Data la care urmeaza sa fie efectuata testarea.personalului 16.11.2017

Tabel testare personal

Data testării. 16.11.2017

Cine a efectuat testarea As. Pascu Gabriela

	Nume / prenume	B.	S.	Ns.	Semnatura
1	Mares Mariana	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Poiana Tardea Elena	<input checked="" type="checkbox"/>			



Centralizator pentru indicatorii de monitorizare ai rezultatelor/analiza rezultatelor implementarii pentru procedura operationala privind utilizarea etuvei cu aer cald(Pupinel)

Indicatori de monitorizare ai rezultatelor	Analiza rezultatelor implementarii			
	Analiza 1 data	Analiza 2 data	Analiza 3 data	Analiza 4 data
<b>Indicatori de structura. Personal</b> <i>(medici, asistente medicale, infirmiere, alte categorii de personal)</i>				
<b>Indicatori de proces.</b> Echipamente Materiale sanitare Materiale de curatenie Biocide				
<b>Indicatori de rezultat .</b> Eficienta ingrijirilor Eficienta manevrelor medicale Cresterea calitatii serviciilor medicale Cresterea calitatii serviciilor hoteliere				

