

SPITALUL ORĂȘENESC BUHUȘI

Oras Buhuși, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău. A.S.F. nr. 1031 din 12.03.2018. C.I.F. 4187271. Cod postal 605100.

Accreditat A.N.M.C.S.. ORDIN 235/ 30.12.2015. Operator de date Nr.notificare. 17475

Tel: 0234-262220 – centrala. Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;

e-mail: spitalbuhusi@gmail.com. site: www.spitalbuhusi.ro



Spitalul
Orășenesc
Buhuși



I.S.O. 9001/2015 studii clinice
N.C. 56336/A/001/UK/Ro

I.S.O. 22000/2005
N.C. 56336/A/0002/UK/Ro

O.H.S.A.S. 18001/ 2007
N.C.56336/B/0001/UK/Ro

Nr. 4533 din 10.04.2019.

Avertisment ! Acest document conține informații și date care sunt proprietatea Spitalului Orasenesc Buhuși.
Reproducerea și difuzarea sunt în exclusivitate dreptul spitalului.

PROCEDURA PRIVIND UTILIZAREA PRODUSULUI OXIVIR PLUS SPRAY

Pagina de garda

Procedură	Operatională	De sistem	x
Ediția I Revizia I			
Număr procedură 04/2019			
Domeniul de activitate reglementat	Medico-chirurgical	Nemedical	x
Cod Procedură PS.CP.20.N			
Exemplarul nr.			

Elaborat. CPIAAM As.pr.PELIN Camelia As.Munteanu Beatrice	Data. 9.04.2019	Semnatura.
Verificat. Dir. Medical. ROTARU Hilda	Data. 10.04.2019	Semnatura.
Verificat pentru conformitate S.M.C.	Data. 10.04.2019	Semnatura. DE CALITATE fig. VANCEANU ALINA
Avizat . Președintele Comisiei de Monitorizare	Data. 10.04.2019	Semnatura.
Viză Juridic. (dacă se face referire la acte normative in vigoare)	Data. 10.04.2019	Semnatura.
Aprobat. Manager. POIANA Constantin	Data. 10.04.2019	Semnatura.

CUPRINS

- Pagina de garda
- Scop/Necesitatea elaborarii
- Domeniu de aplicare
- Definitii si abrevieri
- Descrierea activitatii sau procesului
- Identificarea, analiza si tratarea riscurilor
- Responsabilitati
- Formular evidenta modificari
- Formular analiza procedura
- Formular distribuire procedura

SCOP / NECESITATEA ELABORĂRII

Utilizarea corecta a produsului biocid Oxivir Plus Spray.

DOMENIU de APLICARE

Aceasta procedura se aplica de catre personalul de pe sectiile/compartimentele Spitalului Orasenesc Buhuși.

DOCUMENTE de REFERINȚĂ

Aviz Nr.3039BIO/02/12.24

Spitalul Orasenesc Buhuși

SMC

SPITALUL OR. BUHUȘI
EIROU CALITATE

DEFINIȚII și ABREVIERI

Oxivir Plus Spray este un dezinfectant folosit pentru dezinfectia suprafetelor si a dispozitivelor medicale din unitati sanitare si a celor amplasate in spatii private si publice.

DESCRIEREA ACTIVITAȚII sau PROCESULUI

Domeniul si aria de utilizare

A.Domeniul de utilizare	Dezinfectante si algicide care nu sunt destinate aplicarii directe la oameni si animale
B.Aria de aplicare	Dezinfectia suprafetelor si a dispozitivelor medicale din unitati sanitare si a celor amplasate in spatii private si publice.

Indicatii de utilizare

Metoda de aplicare	Concentratia solutiei de lucru/doza de aplicare	Timpul de actiune
Stergere,pulverizarea si imersia suprafetelor si dispozitivelor medicale in unitatile sanitare si a celor din afara unitatilor sanitare	Eficacitate bactericida,levuricida,fungicida,virucida nediluat	5 min
	Eficacitate tuberculocida nediluat	15 min
	Inactiveaza virusurile Poliovirus tip 1;Adenovirus tip 5, MNV nediluat	2 min
	Inactiveaza virusurile Adenovirus tip 5,Poliovirus tip 1, Murine norovirus,Vaccinia virus cu extindere pentru toate virusurile capsulate si necapsulate inclusiv HIV,HBV,HCV,Virusul hepatitei B&C nediluat	5 min

IDENTIFICARE, ANALIZA și TRATAREA RISCURILOR (Se regasesc in centralizatorul indicatori de eficiență și eficacitate/ raport de analiză/ risc rezidual)

Risc:Aparitia infectiilor asociate asistentei medicale in cazul utilizarii necorespunzatoare a produsului biocid.

RESPONSABILITĂȚI

Personalul de pe sectiile/compartimentele Spitalului Orasenesc Buhusi.

Spitalul Orasenesc Buhusi



SMC

SPITALUL OR. BUHUȘI
OU CALITATE

FORMULAR de EVIDENȚĂ a MODIFICĂRILOR

Ediția/ Revizia	Componenta revizuită, numarul și data	Numărul paginii unde s-a efectuat modificarea	Descrierea modificării	Avizul sefului / coordonatorului structurii
Numarul și data ediției →	I	-	-	
Numarul și data reviziei 1 →	x 4533 / 10.04.2019	Pagina 2	Indicatiile de utilizare	
Numarul și data reviziei 2 →				
Numarul și data reviziei 3 →				

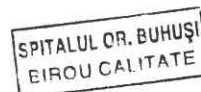


FORMULAR de ANALIZĂ a PROCEDURII

Denumirea structurii care exprimă punctul de vedere	Nume/ prenume șef/ coordonator	Avizul favorabil data /semnatura	Aviz nefavorabil precizarea explicita a observațiilor
Pediatrie	As.Ciobanu Mihaela	11.04.2019	
Med.Interna	As.Balaceanu Gabriela	-	
Boli Cronice	As.Mihalache Gianina	-	
Neurologie	As.Fermus Delia	-	
Bloc Operator	As.Oprea Cristina	-	
Structura Spitalizare de zi	As.Buculei Alexandru	-	
Chirurgie	As.Schiopu Monica	-	
ATI	As.Baciu Cristi	-	
Boli Infectioase	As.Vieru Radu	-	
Psihiatrie Cronici	As.Samoila Mihaela	-	
Ingrijiri paliative	As.Apostol Cristina	-	
Bloc Alimentar	As.Lazar Manuela	-	
Laborator analize	As.Niculae Ioana	-	
C.P.U.	As.Barjovanu Mihaela	-	
T.B.C.	As.Petrea Magda	-	
Ambulatoriu	As.Peptine Gabriela	-	
Sterilizare	As.Mares Mariana	-	

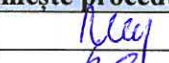
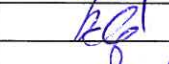
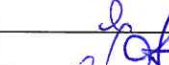
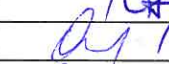
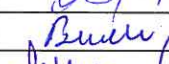
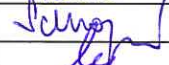
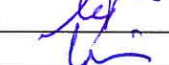

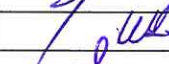
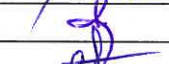

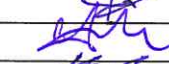
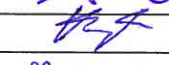
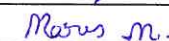





SMC



Procedura nr. 1
 din 12.04.2019

FORMULAR de DISTRIBUIRE / DIFUZARE

Denumirea structurii care primește procedura	Numele/ prenumele și semnatura persoanei care primește procedura	Data primirii	Data retragerii versiunii procedurii înlocuite	Data intrării în vigoare a noii proceduri
Pediatrie	As.Ciobanu M. 	11.04.2019	12.04.2019	12.04.2019
Med.Interna	As.Balaceanu G. 	-		
Boli Cronice	As.Mihalache G. 	-		
Neurologie	As.Fermus D. 	-		
Bloc Operator	As.Oprea C. 	-		
Structura Spitalizare de zi	As.Buculei A. 	-		
Chirurgie	As.Schiopu M. 	-		
ATI	As.Baciu Cristi 	-		
Boli Infectioase	As.Vieru R. 	-		
Psihiatrie Cronici	As.Samoila M. 	-		
Ingrijiri paliative	As.Apostol C. 	-		
Bloc Alimentar	As.Lazar M. 	-		
Laborator analize	As.Niculae I. 	-		
C.P.U.	As.Barjovanu M. 	-		
T.B.C.	As.Petrea M. 	-		
Ambulatoriu	As.Peptine G. 	-		
Sterilizare	As.Mares M. 	-		

SPITALUL OR. BUHUȘI
 BIROU CALITATE



SMC

SPITALUL OR. BUHUȘI
 BIROU CALITATE

CENTRALIZATOR INDICATORI de EFICIENȚĂ și EFICACITATE/ RAPORT de ANALIZĂ/ RISC REZIDUAL

Indicatori	Analiza rezultatelor implementarii		
	Analiza anuala a eficienței și eficacității/ Raport de analiză/ Risc rezidual		
Indicatori de eficiență			
Indicatori de eficacitate			
Raportul de analiză, concluzii și propuneri de menținere, revizuire, reeditare sau abrogare a procedurii, după caz.			
	Raportul de analiză a fost transmis către	Data	Semnatura
Riscul rezidual obținut comparativ cu riscul rezidual estimat, la 1 an.			



Spitalul Orasenesc Buhuși

SMC

