

# SPITALUL ORASENESC BUHUSI

Oras Buhuși, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău. A.S.F. nr. 1031 din 12.03.2018. C.I.F. 4187271. Cod postal 605100.

Acreditat A.N.M.C.S.. ORDIN 235/ 30.12.2015. Operator de date Nr.notificare. 17475

Tel: 0234-262220 – centrala. Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;

e-mail: [spitalbuhusi@gmail.com](mailto:spitalbuhusi@gmail.com). site: [www.spitalbuhusi.ro](http://www.spitalbuhusi.ro)



Spitalul  
Orăsenesc  
Buhuși



I.S.O. 9001/2015 studii clinice  
N.C. 56336/A/001/UK/Ro

I.S.O. 22000/2005  
N.C. 56336/A/0002/UK/Ro

O.H.S.A.S. 18001/ 2007  
N.C.56336/B/0001/UK/Ro

Nr. 4536 din 10.04.2019

**Avertisment !** Acest document conține informații și date care sunt proprietatea Spitalului Orăsenesc Buhuși.  
Reproducerea și difuzarea sunt în exclusivitate dreptul spitalului.

## PROCEDURA DE UTILIZARE PENTRU JACLOR (Aviz nr. 1893BIO/04/12.24)

### Pagina de garda

Procedură	Operatională	De sistem	x
Ediția I                      Revizia			
Număr procedură 03/2019			
Domeniul de activitate reglementat	Medico-chirurgical	Nemedical	x
Cod Procedură PS.CP.03.N.2019			
Exemplarul nr.			

Elaborat. CPIAAM As.PELIN Camelia                      As.MUNTEANU Beatrice	Data. 9.04.2019	Semnatura. 
Verificat. Dir. Medical. ROTARU Hilda	Data. 10.04.2019	Semnatura. 
Verificat pentru conformitate S.M.C.	Data. 10.04.2019	Semnatura MANAGER DE CALITATE Ina VRINCEANU ALINA 
Avizat . Președintele Comisiei de Monitorizare	Data. 10.04.2019	Semnatura 
Viză Juridic. (dacă se face referire la acte normative in vigoare)	Data.	Semnatura.
Aprobat. Manager POIANA Constantin	Data. 10.04.2019	Semnatura. 

### CUPRINS

- Pagina de garda
- Scop/Necesitatea elaborarii
- Domeniu de aplicare
- Definitii si abrevieri
- Descrierea activitatii sau procesului
- Identificarea, analiza si tratarea riscurilor
- Responsabilitati
- Formular evidenta modificari
- Formular analiza procedura
- Formular distribuire procedura

### SCOP / NECESITATEA ELABORĂRII

Scopul elaborarii acestei proceduri este de a utiliza corect produsul biocid Jaclor cu Aviz nr. 1893BIO/04/12.24

### DOMENIU de APLICARE

Aceasta procedură se aplica de catre tot personalul medical din Spitalul Orasenesc Buhuși.

Spitalul Orasenesc Buhuși

SMC

SPITALUL OR. BUHUSI  
BIROU CALITATE

## DOCUMENTE de REFERINȚĂ

Aviz MS nr.1893BIO/04/12.24

Fisa cu date de securitate.

## DEFINIȚII și ABREVIERI

Jaclor, cu aviz nr.1893BIO/04/12.24, este un produs biocid care face parte din grupa principala 1, tip de produs 4.

## DESCRIEREA ACTIVITAȚII sau PROCESULUI

Jaclor este un dezinfectant clorigen sub forma de tablete care se utilizeaza numai dizolvat in apa, in concentratiile specificate de producator. Se dizolva in apa, la temperatura de 20°C cantitatea de tablete recomandata pentru utilizarea propusa. Se asteapta pana la dizolvarea completa a tabletelor. Se poate amesteca pentru a grabi procesul de dizolvare. Dezinfectia se poate realiza prin stergere cu ajutorul mopului, prin frecare cu laveta sau prin imersie.

Arie de aplicare: dezinfectia veselei si tacamurilor (din bucatarii si officii alimentare), suprafete care vin in contact cu alimentele (inclusiv cele pe care se proceseaza alimentele), echipamente, recipiente, vesela si tacamurile din cadrul bucatariilor si oficiilor alimentare din spitale, etc

Metoda de aplicare	Concentratia solutiei de lucru/doza de aplicare	Timp de actiune
Stergere suprafete pentru eficacitate fungicida	1 tb la 10 l apa	30 min. 60 min.
Stergere suprafete pentru eficacitate levuricida	1 tb la 5 l apa 1 tb la 10 l apa	15 min. 30 min.
Stergere suprafete inactiveaza virusul MNV	1 tb la 5 l apa	15 min. 30 min. 60 min.
Stergere suprafete pentru eficacitate bactericida Salmonella typhimurium	2 tb la 10 l apa	15 min
Stergere suprafete pentru eficacitate Levuricida	1 tb la 10 l apa 1 tb la 5 l apa 1 tb la 3 l apa 1 tb la 1 l apa	15 min
Stergere suprafete pentru eficacitate fungicida	1 tb la 5 l 1 tb la 10 l	15 min 30 min 60 min
Stergere suprafete pentru eficacitate micobactericida	In conditii de curatenie 1 tb la 2 l apa 1 tb la 3 l apa In conditii de murdarire 1 tb la 2 l apa 2 tb la 1 l apa	30 min 60 min 60 min 60 min
Dezinfectia veselei si tacamurilor (spalare cu detergent, clatire, imersie in solutie, clatire)	1 tb la 5 l apa	15 min
Dezinfectia oualelor	1 tb la 5 l apa 2 tb la 10 l apa	15 min
Dezinfectia sticlăriei de laborator	1 tb la 3 l apa	30 min-imersie urmata de clatire cu apa

**Atentie!**

Folositi manusi de protectie!

Nu beti, nu mancati si nu fumati pe durata manipularii produsului!

**Depozitare:**

Pastrati preparatul in recipiente bine inchise, in loc uscat si bine ventilat, departe de surse de caldura!

Se interzice amestecul solutiei cu alte produse!

**IDENTIFICARE, ANALIZA și TRATAREA RISCURILOR** ( Se regasesc in centralizatorul indicatori de eficiență și eficacitate/ raport de analiză/ risc rezidual)

Risc: Aparitia infectiilor asociate asistentei medicale.

**RESPONSABILITĂȚI**

Personalul medical din sectiile/compartimentele Spitalului Orasenesc Buhusi.





### FORMULAR de EVIDENȚĂ a MODIFICĂRILOR

Editia/ Revizia	Componenta revizuită, numarul și data	Numărul paginii unde s-a efectuat modificarea	Descrierea modificării	Avizul sefului / coordonatorului structurii
Numarul și data <b>ediției</b> →	I	-	-	
Numarul și data <b>reviziei 1</b> →				
Numarul și data <b>reviziei 2</b> →				
Numarul și data <b>reviziei 3</b> →				


### FORMULAR de ANALIZĂ a PROCEDURII

Denumirea structurii care exprimă punctul de vedere	Nume/ prenume șef/ coordonator	Avizul favorabil data /semnatura	Aviz nefavorabil precizarea explicita a observațiilor
Pediatrie	Ciobanu M.	11.04.2019 [Signature]	
Med. Interna	Balaceanu G.	- [Signature]	
Boli Cronice	Mihalache G.	- [Signature]	
Neurologie	Fermus D.	- [Signature]	
Structura Spitalizare de zi	Buculei Alex.	- [Signature]	
Chirurgie	Schiopu M.	- [Signature]	
ATI	Baciu Cristi	- [Signature]	
Boli Infectioase	Vieru R.	- [Signature]	
Psihiatrie Cr.	Samoila M.	- [Signature]	
Lab. Analize	Niculae I.	- [Signature]	
Bloc Alimentar	Lazar M.	- [Signature]	
Ingr. Paliative	Apostol C.	- [Signature]	



Spitalul Orasenesc Buhusi

SMC

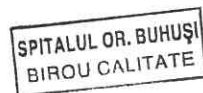

11.04.2019

### FORMULAR de DISTRIBUIRE / DIFUZARE

Denumirea structurii care primește procedura	Numele/ prenumele și semnatura persoanei care primește procedura	Data primirii	Data retragerii versiunii procedurii înlocuite	Data intrării în vigoare a noii proceduri
Pediatrie	Ciobanu M.	11.04.2019		11.04.2019
Med. Interna	Balaceanu G.	-		
Boli Cronice	Mihalache G.	-		
Neurologie	Fermus D.	-		
Structura Spitalizare de zi	Buculei Alex.	-		
Chirurgie	Schiopu M.	-		
Boli Infectioase	Vieru R.	-		
Psihiatrie Cr.	Samoila M.	-		
Lab. Analize	Niculae I.	-		
Bloc Alimentar	Lazar M.	-		
Ingr. Paliative	Apostol C.	-		
ATI	Baciu Cristi	-		



Spitalul Orasenesc Buhusi

SMC



SPITALUL OR. BUHUSI  
2017/01/30/000001

**CENTRALIZATOR INDICATORI de EFICIENȚĂ și EFICACITATE/ RAPORT de ANALIZĂ/ RISC REZIDUAL**

Indicatori	Analiza rezultatelor implementarii		
	Analiza anuala a eficienței și eficacității/ Raport de analiză/ Risc rezidual		
Indicatori de eficiență			
Indicatori de eficacitate			
Raportul de analiză, concluzii și propuneri de menținere, revizuire, reeditare sau abrogare a procedurii, după caz.			
	Raportul de analiză a fost transmis către	Data	Semnatura
Riscul rezidual obținut comparativ cu riscul rezidual estimat, la 1 an.			

